

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MyClean® DS A Schnelldesinfektion

- Alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid (inkl. M.-terrae), levurozid
- Wirkt begrenzt viruzid (HBV/HIV, BVDV(HCV), Vaccinia-, Influenza-/Grippe-Viren) (alle behüllten Viren gemäß RKI-Empfehlung)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno-, SV40-Viren
- Für die Tränkung von Tüchern geeignet
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Trocknen
- Hohe Materialverträglichkeit (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z. B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.)
- Geeignet für den Lebensmittelbereich (HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung)

Anwendungsbereich: Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von alkoholbeständigen, wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar im patientennahen Umfeld in Kliniken, Praxen, Ambulanzen oder Pflegeeinrichtungen. (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z. B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.).

Ausführungen:

MyClean® DS A – Schnelldesinfektion

Artikelbeschreibung / Article Description	Duft / Aroma	Pack.-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	EAN	PZN	Pack / VE
Schnelldesinfektion / rapid disinfection	Neutral / neutral	1L	79615	4046153116201	10308644	12
Schnelldesinfektion / rapid disinfection	Neutral / neutral	5L	79649	4046153118540	10843828	2
Schnelldesinfektion / rapid disinfection	Neutral / neutral	10L	79616	4046153117017	10308650	1

Einwirkzeiten gemäß VAH-Richtlinien und EN-Normen:

Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, TBC (M.-terrae) gem. VAH, EN 16615, EN 14348 (hohe Belastung):	konz. 1 Min.
Vaccinia Ankara/BVDV (HCV) gem. EN 14476 (mit Belastung 10 % FBS):	konz. 30 Sek.
Rota-Viren gem. EN 14476 (ohne Belastung):	konz. 30 Sek.
Noro-Viren gem. EN 14476 (hohe Belastung):	konz. 5 Min.
Adeno-Viren gem. EN 14476 (geringe Belastung):	konz. 1 Min.
SV40-Viren gem. DVV/RKI (mit Belastung 10 % FBS):	konz. 15 Min.

Zusammensetzung 100 g Lösung enthalten:
Wirkstoffe: 8,0 g 1-Propanol, 42 g Ethanol

Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG, VAH, HACCP
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE-Klassifizierung: Klasse IIa


Verwendbarkeit: 3 Jahre

Standzeit: nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.

Symbole:



Gefahr Achtung

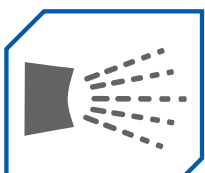

MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MyClean-DS-A-Schnelldesinfektion-20181107